


ETHYLOMETRE DIGITAL

Réf. 023 020

1. Description

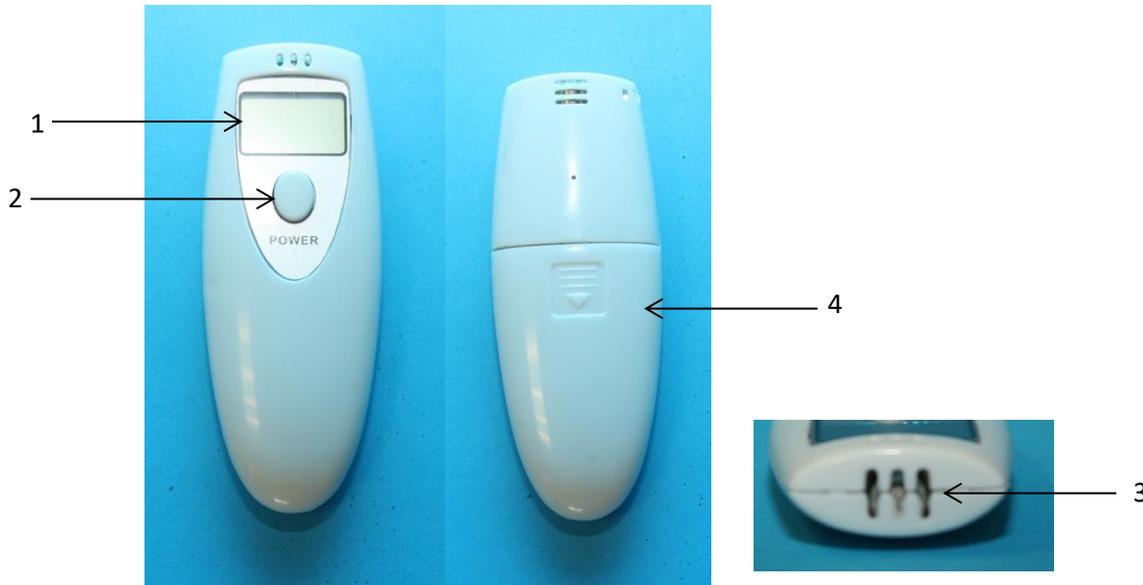

- 1 Ecran LCD
- 2 Bouton marche
- 3 Inhalateur / souffleur
- 4 Compartiment à piles


Caractéristique :

- Test d'alcool digital avec alerte sonore
- Gamme : 0,00-0,19% BAC et 0,0-1,9g/l
- Réponse rapide
- Mise hors tension automatique
- Pile alcaline AAA 1,5V non fournies
- Dimensions : 95x36x18mm

2. Utilisation :

* Insérer les piles dans le compartiment à pile.


*Allumer l'appareil en appuyant sur le bouton marche. L'appareil est alors en mode warm up. L'écran LCD affiche « warm up » et un compte à rebours de 10 secondes.

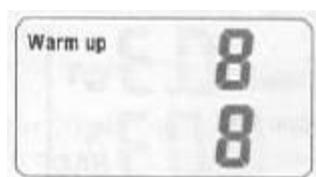

Note :

il y a toujours un grand nombre de gaz et d'impuretés absorbés à la surface du capteur d'alcool lors de la première utilisation ou après une longue période de non utilisation. Il faudra alors plus de temps pour nettoyer et préparer l'appareil pour la mesure. Vous devrez appuyer de nouveau sur le bouton marche et cela plusieurs fois si nécessaire.

*Les 10 secondes écoulées l'appareil passe en mode « blow ». L'écran affiche « blow » et un compte à rebours de 10 secondes.

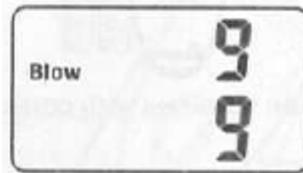


*Approcher l'inhalateur et souffler dedans pendant 3-5 secondes.

*Lire la valeur affichée sur l'écran.

* « Caution » s'affiche si la concentration d'alcool est comprise entre 0,02% Bac (ou 0,2g/l) et 0,05% BAC (ou 0,5g/l).

* « Danger » apparaît lorsque la concentration est supérieure ou égale à 0,05% BAC (ou 0,5g). Dans ce cas l'utilisateur est alerté avec un bip sonore.

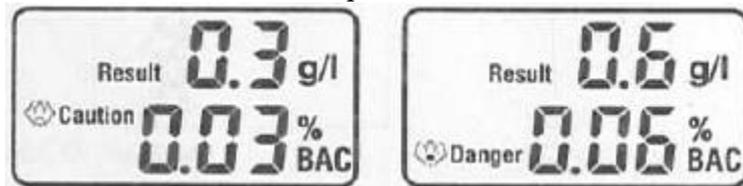

*La valeur reste affichée pendant 10 secondes. Ensuite « OFF » apparaît pendant 2-3 secondes. L'appareil s'éteint automatiquement.

Lorsque le mode warm up échoue l'appareil s'éteint. Rallumer alors l'appareil.

Pour des résultats plus précis répéter la mesure 2-3 fois.

3. Précautions :

- Après la prise d'alcool il est recommandé d'attendre 20 minutes avant de faire la mesure. C'est le temps qu'il faut au sang pour absorber l'alcool.
- Pour des résultats plus précis attendre 3 minutes entre chaque mesure.
- Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas introduire de liquide dans l'inhalateur.

4. Nous contacter :

Ce matériel est garanti 2 ans. Pour toutes questions, veuillez contacter :

sav@sciencethic.com

www.sciencethic.com